



「プレオルソ」®こども歯ならび矯正法

News Letter

プレオルソを受講された先生方へ。

謹賀新年
今年も宜しくお祝い申し上げます。

今回は、装置の洗浄についてです。
プレオルソ装置をよく使う患者さんは
歯石、歯垢、白い物が付着することがあります。
こんな時は、義歯洗浄用の洗浄液をお奨めしています。

また、「プレオルソこども歯ならび矯正法・アドバンスコース」を来年2015年4月9日(木)開催いたします。
申し込み用紙を配布させていただきます。

この News Letter は、私の知り合いの先生やセミナーを受講された先生を中心に送らせていただいております。
趣旨は私が日常臨床の中で「大塚式」こども歯ならび矯正法を実践していく中で気がついたこと、改善点、新しいアイデアなどをお伝えするためのメールです。
「プレオルソ」こども歯ならび矯正法 News Letter」を PDF にて配信させていただきます。不要の方や、アドレス変更ご希望の方は下記へお願いします。
<http://www.ooc.or.jp/preortho/newsletter/>

「プレオルソ」こども歯ならび矯正法 News Letter」バックナンバーは、こちら
<http://www.ooc.or.jp/preortho/newsletter/backnumber/>

ご不明な点がございましたら下記までご連絡いただければと思います。

information

「プレオルソ」こども歯ならび矯正法 News Letter」のバックナンバーページを制作致しました。
こちらからご覧ください。

<http://www.ooc.or.jp/preortho/newsletter/backnumber/>


「プレオルソ」こども歯ならび矯正法 DVD 販売中！！
以前、講習会を受講された先生は、¥43,200(税込)で販売致します。講習会を受講された先生、DVD を購入された先生は、プレオルソ装置を購入することができます。
DVD は 2 枚組、講義シラバス (A4/118 ページ) が付属しております。

DVD のイントロ部分の動画を公開しております。
ご参考にしてみてください。

<http://youtu.be/cljsMYNiw5Q>

大塚矯正歯科クリニック
〒700-0903 岡山市北区幸町 8-18
Phone:086-234-0006 / Fax:086-234-3446
Eメール info@ooc.or.jp

- ★フェイスブック ツイッター
「大塚 淳」の実名で登録してます。
友達申請 / フォローをお待ちしております♪
- ★「いいね」 ボタンを押して頂ければ嬉しいです♪

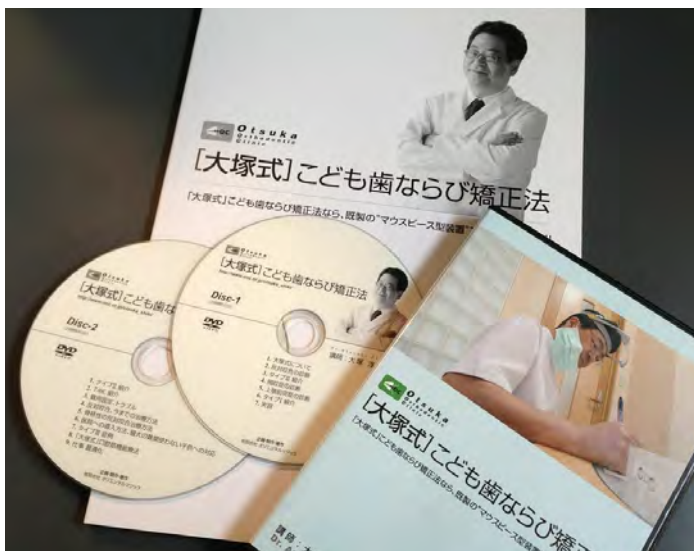

「プレオルソ」こども歯ならび矯正法 DVD

定価 48,600 円 (税込)
以前、講習会を受講された先生は、¥43,200(税込) ネットからのご注文は、こちらから。
<http://www.ooc.or.jp/preortho/>
FAX でのご注文は、本 PDF3 ページ目の注文書にご記入頂き 086-234-3446 までお送りください。



1 ブラシでプレオルソをしっかりと磨(中性洗剤)

2 容器にプレオルソを入れ、「アシッドクリーナー」原液を浸る程度入れる

3 容器ごと超音波洗浄機に5分かける

4 容器内の「アシッドクリーナー」原液を捨て、お水に替える

5 容器ごと超音波洗浄機に5分かける

6 容器からプレオルソを取り出し、ブラシを使い流水で磨く

T&Mアシッドクリーナー



アシッドクリーナー詳細

T&Mアシッドクリーナー



通常価格

1,980円 (税抜1,833円)

商品ID

80117418

入数・内容量

1本 (1.2L)

歯石除去と金属の輝きに重点をおいた
酸性の義歯洗浄剤です。
超音波洗浄器を5～10分間使用して下さい。